


VBM tracheatubus-rögzítő


Az új tubusrögzítővel biztonságosan köthetjük le az endotracheális tubusokat, laringeális maszkokat és laringeális tubusokat. Az öntapadó tépőzáras szalag megbízható védelmet nyújt a tubusok nem kívánt elmozdulása ellen.

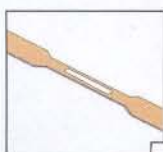

- nincs szükség külön ragtapszra
- biztonságos rögzítés az öntapadó tépőzáras szalag segítségével
- a kényelmes, lágy szivacsanyag megakadályozza a nyomás okozta bőrszövetkárosodást
- könnyen helyezhető kesztyűben is
- nem akadályozza a szájüreghez való hozzáférést
- alkalmas, orális és nazális intubáció esetén egyaránt
- bármikor könnyen cserélhető



Vegyük le az öntapadó tépőzáras szalagot a tubusrögzítőről és ragasszuk körül az endotracheális tubuson.

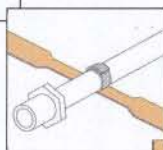

A tubusrögzítő szalag közepére nyomjuk rá erősen a tubusra előzőleg felragasztott tépőzáras szalagot és csavarjuk körül rajta.



Ügyeljünk arra, hogy a szalagnak csak a bőrszínű fele tapadjon hozzá a tépőzárhoz.



Figyeljünk arra, hogy lekötszalagnak ne a bőrszínű felülete érintkezzen a páciens bőrfelületével. Tekerjük a lekötszalagot a nyak köré és hátul, az egymást keresztező szalagvégeken lévő kicsi, szintén tépőzáras fülekkel rögzítsük a tubuslekött.

Tubusrögzítő felnőtteknek és gyermekeknek, hossza 55 cm
Tubusrögzítő felnőtteknek, hossza 65 cm

Kat.szám: 40-8010-033
Kat.szám: 40-8010-044

VBM

Pásztor ADA-MED Kft.

1029 Budapest Zsolt fejedelem u. 19/B.

T: 397-0109, 376-9576 Fax: 376-9576 * E-mail: adamed@adamed.hu * www.adamed.hu

